

Snabbguide Zenicor-EKG (Basanvändare)

Registrera ny patient

1. Öppna din webbläsare och skriv in: **ekg.zenicor.se**

Logga in med ditt **användarnamn** och **lösenord** som du fått från Zenicor.

2. För att registrera en ny patient och koppla en apparat till denne, klicka på **Ledig** under **Apparatöversikt**.
Välj en ledig apparat och **klicka på apparat-ID**.

3. Fyll i **Personnummer** och **Namn** eller **Studie-ID** och övrig önskvärd information.

4. Det förinställda **Start- och slutdatumet** kan ändras manuellt vid behov under sektion **Utredning**.

Klicka på **Spara** för att registrera den nya patienten.

5. Det är starkt rekommenderat att utföra ett **test-EKG** tillsammans med patienten för att säkerställa god kvalitet på mätningen. Efter att ha klickat på **Spara** så kommer du automatiskt till test-EKG-sidan.

Tryck på **Start på apparaten** och be patienten att placera sina tummar/fingrar lätt på elektroderna.

Tryck på **Sänd** när mätningen är avslutad. EKG:t kommer att **visas**

automatiskt på skärmen så fort det är mottaget av systemet, om inte, klicka på **Uppdatera**. Vid dålig kvalitet på EKG:t, repetera test-EKG-momentet tills du erhållit god kvalitet. Apparaten är sedan redo för användning.

För att få bästa möjliga kvalitet och resultat på undersökningen, informera patienten om följande:


- **Håll tummarna/fingrarna stilla** på elektroderna, **tryck inte**.
- **Håll överkropp, axlar och armar avslappnade**. Om möjligt, **sitt ner** under mätningen.
- **Undersökningen är personlig!** Apparaten får **inte lånas ut** eller användas av någon annan.
- **Undvik** att använda **handkräm** eller liknande.
- **Undvik** att **tala, skratta** eller **hosta** under mätningen.
- **Symptom kan markeras** genom att trycka på **!** -knappen **FÖRE** man sänder mätningen.
- För patienter med **tremor** kan **apparaten placeras på ett bord** och mätningen utföras med **pekfingrarna** så att **handleden stöder mot bordet** för att undvika störningar på mätningen.
- **Fortsätt med mätningarna även om man inte lyckats sända dem. Alla osända mätningar sparas på minneskortet i apparaten.**
- **Mät 2-4 gånger per dag**, exempelvis vid måltider, kl. 8-12-16-20 för att sprida mätningarna över dagen eller ställ in påminnelse på mobiltelefonen.

Koppla loss apparat från patient

När patienten lämnat tillbaka apparaten:

1. Tryck på **Start** på apparaten och **sänd eventuella osända mätningar**.
 - Detta för att säkerställa att mätningarna associeras med rätt patient före man kopplar loss apparaten.

Alla patientuppgifter och mätningar finns sparade i systemet, även efter bortkoppling av apparat.

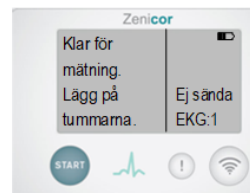

2. Logga in i systemet. Leta upp aktuell apparat under **Upptagen** eller **Försenad** i **Apparatöversikten**.

Apparatöversikt	Ledig (1)	Försenad (0)	Upptagen (2)
Apparat	Namn (Personnr)		Åter
A003088	, (Test)		2018-10-18
A001644	, PD (DEV)		2018-10-31

3. Klicka på **Koppla loss apparat**.

Ett pop-up fönster ber dig kontrollera om det finns några osända EKG. **Klicka OK**, apparaten kopplas nu loss från patienten.

Apparat

Apparat-ID

A003088

Koppla loss apparat

Registreringstid: 30 s, Språk: Svenska

[Visa fler](#)

Apparatskötsel

När patienten har returnerat en apparat måste den rengöras. Använd en desinfektionsservett anpassad för medicinsk teknik eller använd 45% desinfektionsalkohol på en trasa och torka försiktigt av apparaten.

Förbered apparaten inför nästa patient genom att kontrollera batteristatus på apparaten. Detta gör du genom att trycka på **Start på apparaten**. I övre högre hörnet syns en **batteriindikator som bör visa minst 3 av 4 punkter** för att säkerställa att tillräckligt med energi finns för att både mäta och sända EKG.

För fullständiga instruktioner, se **Användarhandledningar** inne i Zenicor View under **Hjälp**. Du kan också kontakta din Zenicor-representant; info@zenicor.se eller ringa 08-442 68 60.