

## Snabbguide Zenicor-EKG (Standardanvändare)

### Registrera ny patient

- Öppna din webbläsare och skriv in: **ekg.zenikor.se**  
Logga in med ditt **användarnamn** och **lösenord** som du fått från Zenicor.
- För att registrera en ny patient och koppla en apparat till denne, klicka på **Ledig** under **Apparatöversikt**.  
Välj en ledig apparat och **klicka på apparat-ID**.
- Fyll i **Namn** och **Personnummer** och övrig önskvärd information.
- Det förinställda **Start- och slutdatumet** kan ändras manuellt vid behov.  
Klicka på **Spara** för att registrera den nya patienten.  
Apparaten är nu redo för användning.
- Det är starkt rekommenderat att utföra ett test-EKG tillsammans med patienten för att säkerställa god kvalitet på mätningen. Tryck på **Start på apparaten** och be patienten att placera sina tummar/fingrar lätt på elektroderna. Sänd in mätningen och verifiera sen god kvalitet.

För att få bästa möjliga kvalitet och resultat på undersökningen, informera patienten om följande:

- Håll tummarna/fingrarna stilla på elektroderna, **tryck inte**.
- Håll överkropp, axlar och armar avslappnade. Om möjligt, **sitt ner** under mätningen.
- Undersökningen är **personlig!** Apparaten får **inte lånas ut** eller användas av någon annan.
- Undvik** att använda **handkräm** eller liknande.
- Undvik** att **tala, skratta** eller **hosta** under mätningen.
- Symptom kan markeras** genom att trycka på **!** -knappen **FÖRE** man sänder mätningen.
- För patienter med **tremor** kan **apparaten placeras på ett bord** och mätningen utföras med **pekfingrarna** så att **handleden stöder mot bordet** för att undvika störningar på mätningen.
- Fortsätt med mätningarna** även om man **inte lyckats sända dem**. *Alla osända mätningar sparas på minneskortet i apparaten.*
- Mät 2-4 gånger per dag**, exempelvis vid måltider, kl. 8-12-16-20 för att sprida mätningarna över dagen eller ställ in påminnelse på mobiltelefonen.


Det är rekommenderat att **läsa av mätningar under tiden apparaten är hos patient**, för att **tidigt upptäcka händelser** och att **säkerställa sig om god kvalitet på mätningarna**. Vid dålig kvalitet på mätningar kan det vara bra att ringa upp patienten och ge tips på hur denne kan mäta på ett bättre sätt (se ovan).

## Koppla loss apparat från patient

När patienten lämnat tillbaka apparaten:

1. Tryck på **Start** på apparaten och **sänd eventuella osända mätningar**.
  - Detta för att säkerställa att mätningarna associeras med rätt patient före man kopplar loss apparaten.

Alla patientuppgifter och mätningar finns sparade i systemet, även efter bortkoppling av apparat.

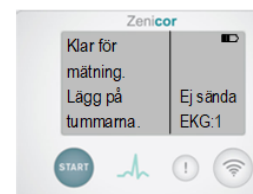

2. Logga in i systemet. Leta upp aktuell apparat under **Upptagen** eller **Försenad** i **Apparatöversikten**.

Apparat	Namn (Personnr)	Åter
A003088	, (Test)	2018-10-18
A001644	, PD (DEV)	2018-10-31

3. Klicka på aktuellt **Apparat-ID** och klicka sen på **Ändra patientuppgifter**.

Ändra patientuppgifter

4. Klicka på **Koppla loss apparat**.

Ett pop-upp fönster ber dig kontrollera om det finns några osända EKG. Klicka OK, apparaten kopplas nu loss från patienten.

### Apparat

Apparat-ID

A003088

Koppla loss apparat

Registreringstid: 30 s, Språk: Svenska

Visa fler

## Apparatskötsel

När patienten har returnerat en apparat måste den rengöras. Använd en desinfektionsservett anpassad för medicinsk teknik eller använd 45% desinfektionsalkohol på en trasa och torka försiktigt av apparaten.

Förbered apparaten inför nästa patient genom att kontrollera batteristatus på apparaten. Detta gör du genom att trycka på **Start** på apparaten. I **översta högra hörnet** syns en **batteriindikator som bör visa minst 3 av 4 punkter** för att säkerställa att tillräckligt med energi finns för att både mäta och sända EKG.

För fullständiga instruktioner, se **Användarhandledningar** inne i Zenicor View under **Hjälp**. Du kan också kontakta din Zenicor-representant; [info@zenicor.se](mailto:info@zenicor.se) eller ring 08-442 68 60.



Zenicor Medical Systems AB  
Saltmätargatan 8  
SE-113 59 Stockholm  
SWEDEN